




**FORMATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

Código: FM-IN-031

Versión: 1

Fecha: 22/03/2024

INGENIERIA

EQUIPO	Balanzas			
MARCA	Centron			
ORIGEN	Corea del sur			
REGISTRO SANITARIO	N/A			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A			

CM735

CB220

CM760E

Servicio de mantenimiento preventivo	Revisión general y limpieza del sistema eléctrico y electrónico
	Verificación de estado de Batería
	Verificación de peso con peso patrón de 500 gramos
	Revisión del estado físico externo del equipo
	Revisión de estado del sistema de calibración
	Lubricación de partes móviles del equipo
	Prueba de alarmas
	Limpieza integral del equipo
	Todos los mantenimientos realizados por el equipo de ingeniería de BPL, incluyen verificación con equipos Patrón certificados por ONAC .
	Tiempo aproximado del servicio 40 minutos

AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

CB220, CM735, CM760E

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

SEMESTRAL

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	22/3/2024	Creación del documento	Ingeniería
	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
	Auxiliar de ingeniería	Coordinador de ingeniería	Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ingenieria@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia
BPL MEDICAL S.A.S